

ノンコンタクトトノメーター

FT-01



もはや“ノンコンのスタンダード”と呼ぶにふ

ワンタッチで左右両眼のフルオート測定

画面の約1/4に黒目が入れば測定可能です。1回ボタンを押すだけで、自動的に左右両眼の角膜厚・眼圧を測定します。



測定画面




さわしい

ノンコンタクトノメーター

FT-01

角膜厚測定機能

角膜厚と眼圧が同時に測定できます。眼圧と中心角膜厚の測定値から補正眼圧値を表示します。LASIK眼等で変化した角膜厚をとらえ、本来の眼圧値への補正が可能です。測定した角膜厚画像は表示可能です。

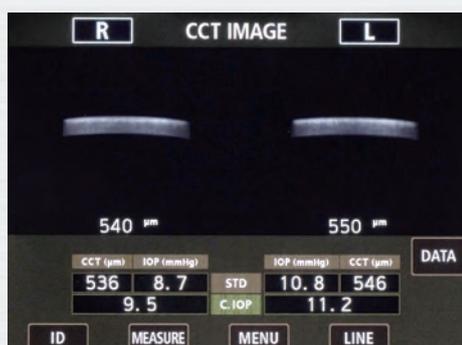

角膜厚測定結果画面

開瞼補助操作がしやすいデザイン


スリムなボディで被検眼の観察や開瞼補助操作がしやすくなりました。

データの入出力

被検者データの入力にはUSB、出力はRS-232C、LANより選択可能です。

オートカットプリンター

本体内蔵プリンターにはオートカット機能付きで、うまく切れないなどの心配がありません。もちろん、用紙の取換えはドロップイン。用紙を入れてフタをするだけです。

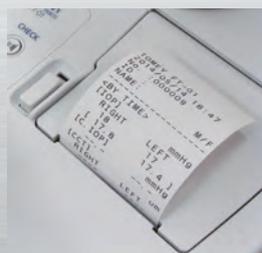

優しいエア

被検者の負担を軽減する優しいエア。



内部固視灯／外部固視灯を装備

内部固視灯の他、外部固視灯を装備。被検者の状態により簡単に切り替えができ、測定がよりスムーズに行えます。

チルト機能付きカラー液晶モニター

約40°まで角度が変えられる5.7インチカラーモニター。被検者の横に立っての操作も容易にできます。

選べるモード

FULL AUTO

1回ボタンを押すだけで、オートアライメント→左右両眼を所定回数測定→測定結果の印刷までを自動で行います。

AUTO

1回ボタンを押すと、オートアライメント→片眼1回測定。

眼を開け続けられない被検者などのために1回ずつ眼の状態を確認しながら測定します。

MANUAL

すべて手動で測定します。

ジョイスティックによるマニュアル操作可能

ジョイスティックを操作して任意のタイミングで測定を行えます。



主な仕様

眼圧測定	
測定範囲	0~60mmHg
表示単位	mmHg/hPa
固視灯	内部固視灯 / 外部固視灯
角膜厚測定	
測定範囲	400~1300 μ m
測定単位	10 μ m
本 体	
プリンター	オートカッター機能付き内蔵型サーマルラインプリンター
測定部移動範囲	前後40mm / 左右90mm / 上下30mm
あご受け移動範囲	上下60mm
データ入出力形式	入力:USB / 出力:LAN、RS-232C
ディスプレイ	5.7インチカラーLCDモニター
寸法/重量	260(W) \times 490(D) \times 500(H)mm / 15kg
認証番号	22400BZX00143A01
医療クラス分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
電源/消費電力	AC100V / 50/60Hz / 約80VA

関連商品

■ オートレフケラトメーター
RC-01



■ ハンディパキメーター
SP-100



オプション

■ キャリングケース



※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

株式会社 トーメーコーポレーション

〒451-0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL (052)581-5321 FAX (052)581-5626
URL <http://www.tomey.co.jp>

ご用命は